

CONHECENDO O TESTE

Identificando os componentes do kit:

1) Swab para coleta da amostra.



2) Tubo com solução diluente.



3) Tira teste.



4) Saco para descarte



5) Cartão de Resultado



6) Instrução de uso



7) Guia do usuário



Faça bochechos com água durante 1 minuto para auxiliar na limpeza bucal antes de iniciar o teste.



REALIZANDO O TESTE

1) Pegue o tubo e inverta tubo 3 vezes para misturar bem.

2) Retire suavemente a tampa do tubo, tomando cuidado para não derramar o líquido.

3) Coloque o tubo com solução diluente no local indicado no cartão de resultado.

4) Abra a embalagem que contém o Swab para coleta de amostra.

OBS: Não toque a área de coleta com os dedos.

5) Passe **suavemente** o Swab sobre a gengiva superior 10 vezes, indo de um canto ao outro. Esse processo deve durar 30 segundos e depois na gengiva inferior por 10 vezes.


6) Coloque o Swab para coleta de amostra no tubo com solução diluente e faça movimentos leves para cima e para baixo, encostando o **Swab na parede do tubo por 10 vezes**, para que a amostra seja misturada na solução diluente.

7) Remova o Swab para coleta de amostra.

8) Insira a tira teste no tubo contendo a amostra misturada com a solução diluente com a seta apontada para baixo. Não permita que o nível de amostra ultrapasse a linha MAX.

Cuidado para não tocar a área abaixo das setas (MAX).

9) Deixe a tira teste por 20 minutos dentro do tubo contendo a amostra misturada com a solução diluente, conte o tempo utilizando relógio ou cronômetro, por exemplo o do celular.

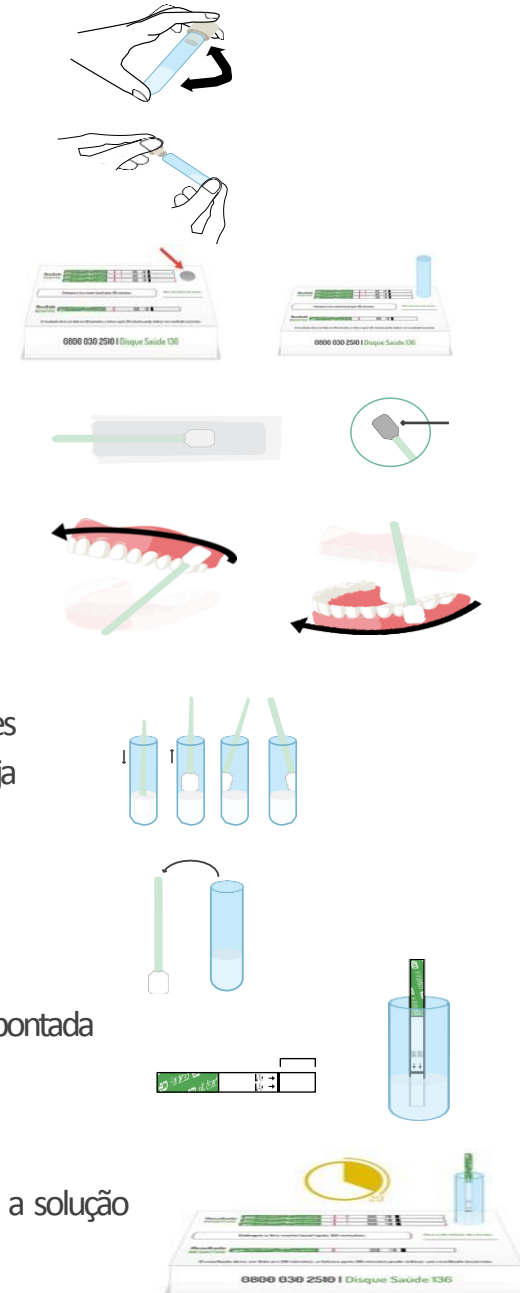

Leitura dos resultados

ATENÇÃO: O resultado deve ser lido entre 20 e 30 minutos, a leitura após 30 minutos pode indicar um resultado incorreto.


Resultado NEGATIVO

Se somente uma linha aparecer na região do controle (C), a ausência de coloração na região do teste (T) indica que o resultado é NEGATIVO.




Resultado POSITIVO

Se duas linhas aparecerem, uma na região do controle (C) e uma na região do teste (T), ainda que fraca ou muito fraca, é possível que tenha o vírus HIV.

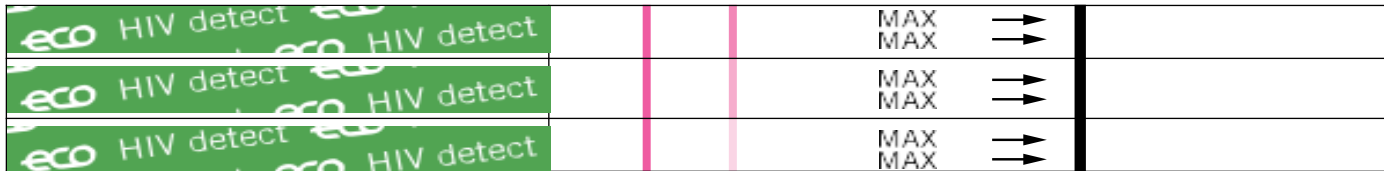

Resultado INVÁLIDO

Se a linha controle (C) não aparecer, o teste é inválido mesmo com o aparecimento da linha T. A linha controle deverá sempre aparecer se o procedimento for realizado adequadamente. Repetir o teste com um novo kit.

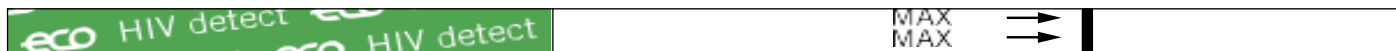


O resultado deve ser lido entre 20 e 30 minutos, a leitura após 30 minutos pode indicar um resultado incorreto.



**20
ESPERAR**



**LER
20 MINUTOS**

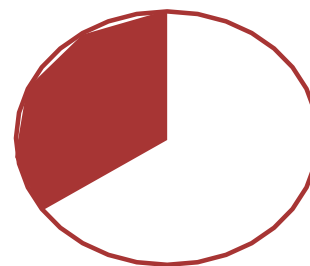

**NÃO REALIZAR A LEITURA
APÓS 30 MINUTOS**